

mod. 001

# comment utiliser **BENDANA** ABDOMEN THORAX AJUSTÉE



BREVETÉ



L'animal est encore sous sédatifs, mesurez avec un mètre de couture la circonférence du thorax




Soustrayez de la mesure prise, environ 20% et sur la base de la valeur obtenue choisissez la taille de BENDANA appropriée




Décidez si enfiler deux ou quatre pattes, puis mesurez la longueur de l'animal jusqu'où il y en a besoin (bas ventre ou postérieur)



Si vous voulez enfiler deux pattes seulement, raccourcissez la protection en retirant une ou plusieurs franges de tissus

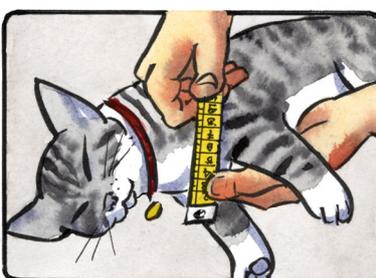

Mesurez l'amplitude de la poitrine entre les deux pattes

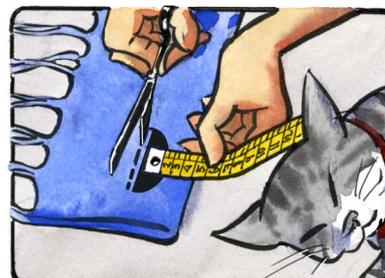

Pliez en deux la protection et reportez la moitié de la mesure de la poitrine. Élargissez les trous en demi-lune si besoin



Toujours en maintenant la protection pliée, percez, si nécessaire, un trou pour les parties génitales masculines



Enfilez les pattes dans les ouvertures déjà créées



Passez BENDANA sous le flanc de l'animal et nouez-le sur le dos



À son réveil, l'animal sera parfaitement confortable et protégé avec BENDANA !

- Ablation masses cutanées et nodules
- Chirurgies abdominales
- Chirurgies thoraciques
- Ovariectomie - Ovario-hystérectomie / stérilisation femelles
- Orchiectomie / stérilisation mâles

ABDOMEN THORAX AJUSTÉE, fournie en neuf tailles, elle est conseillée pour les TYPOLOGIES D'INTERVENTION indiquées ci-dessus

- Lésions diffuses d'origines différentes
- Plaies de léchage
- Morsures
- Dermatitis (ex. Hot spot, atopies...)

... et pour ces PATHOLOGIES COMMUNES



**Protection post-opératoire usage vétérinaire pour animaux de compagnie**

tél. +39 0444 550361 – fax +39 0444 550268- Arcugnano (VICENZA) Italie

**BENDANA**

P.IVA: IT 03652540240 – n. R.E.A VI 342637- info@bendana.it – ordini@bendana.it- www.bendana.it



MADE IN ITALY




# BENDANA

Il s'agit d'une protection post-opératoire à usage vétérinaire, conçue pour couvrir complètement les pansements de façon sûre et durable, en laissant à l'animal une totale liberté de mouvements et supprimant toute gêne procurée par l'utilisation de pansements, bandes velcro et autres. C'est un bandage élastique très facile d'emploi, pouvant s'adapter en quelques étapes à toutes les races et les tailles, il est facile à retirer même au cours des contrôles de routine pendant la convalescence. Il est fabriqué en tissu naturel de jersey ( $\geq 90\%$  coton et 5-10% élasthane). Il est réalisé en plusieurs modèles, formes et tailles différentes en fonction de la Partie du corps à protéger. Deux solutions sont proposées : des articles ajustés prêts à l'emploi et, pour les plus expérimentés, un Ruban continu, à couper en fonction des besoins.


PRODUIT BREVETÉ

## COMMENT PRENDRE LES MESURES

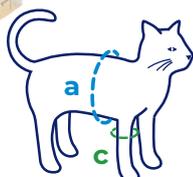


**a** circonférence thoracique -20% environ = **A**

**c** circonférence humérus = **C**

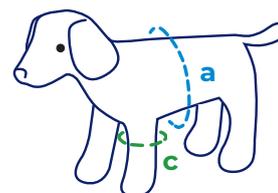

## COMMENT CHOISIR LES TAILLES (MOD. 001)


### ABDOMEN THORAX AJUSTÉE

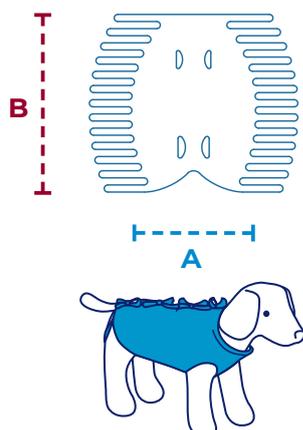

Article	A cm	B cm	taille	poids
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats sans distinction


## 12 MODELES PRODUITS

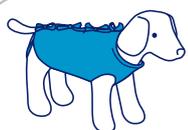

**mod. 001**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
**AJUSTÉE**




**mod. 101**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
**en RUBAN**

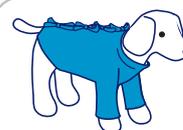

**mod. 011**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
**et MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS**



**mod. 021**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
**et MEMBRES**  
**POSTÉRIEURS**

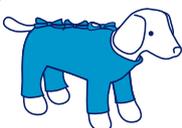

**mod. 031**  
protection  
**ABDOMEN**  
**THORAX et QUATRE**  
**MEMBRES**



**mod. 041**  
protection  
**TÊTE COU**  
**ABDOMEN AJUSTÉE**



**mod. 051**  
protection  
**PORTE HOLTER**




**mod. 052**  
protection  
**FIXE ÉLECTRODES**



**mod. 061**  
protection  
**MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS AVEC**  
**LACETS**



**mod. 071**  
protection  
**TÊTE COU THORAX**

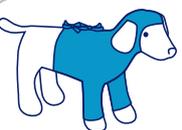

**mod. 081**  
protection  
**TÊTE COU THORAX**  
**et MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS**



**mod. 091**  
protection  
**TOTALE**

Le catalogue complet, le listing des prix et le formulaire de commande sont disponibles sur le site

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)