



mod. 001

cómo se utiliza **BENDANA**

ABDOMEN TÓRAX ENTALLADO



PATENTADO



Mientras el animal está todavía sedado, con un metro flexible mide la circunferencia del tórax



A la medida obtenida, restar el 20 % aprox. y en base al valor obtenido elige la talla de BENDANA adecuada



Decide si introducir dos o cuatro patas, luego mide el largo del animal hasta donde sea necesario (bajo vientre o miembros posteriores)



Si quieres introducir solo dos patas, acorta la protección extrayendo una o más franjas del tejido



Mide la amplitud del pecho entre las dos patas



Dobra en dos la protección y toma la 1/2 de la medida del pecho. Agranda si es necesario los orificios en medialuna para las patas



Siempre, con la protección doblada, si es necesario, crea un orificio para los genitales del macho



Introduce las patas en las aberturas que ya están predisuestas



Pasa BENDANA por debajo del animal y átalos sobre el lomo del mismo



¡Al despertar, el animal estará en perfectas condiciones, a gusto y protegido con BENDANA!

- Extirpación de masas cutáneas y nódulos
- Cirugías abdominales
- Cirugías torácicas
- Ovariectomía-Ovariohisterectomía / esterilización hembra
- Orquiectomía / esterilización macho

ABDOMEN TÓRAX ENTALLADO, disponible en nueve tallas, recomendado para los TIPOS DE INTERVENCIONES indicados anteriormente

- Lesiones difusas de diferentes orígenes
- Heridas por lamido
- Heridas por mordida
- Dermatitis (p. ej. hot spots, atopías...)

.... y para estas PATOLOGÍAS COMUNES



Protección postoperatoria de uso veterinario para mascotas

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637




MADE IN ITALY



BENDANA


Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ($\geq 90\%$ algodón y $5-10\%$ elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. **PRODUCTO PATENTADO**

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

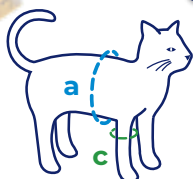


a circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**

c circunferencia húmero = **C**

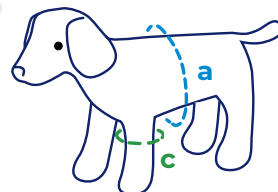

CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 001)

ABDOMEN TÓRAX ENTALLADO

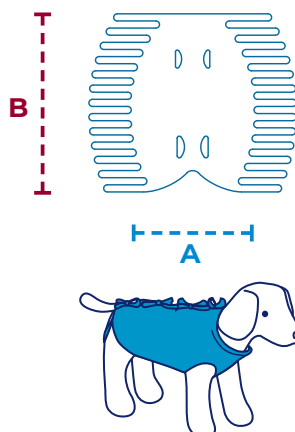

artículo	A cm	B cm	talla	peso
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente


12 MODELOS DE PRODUCTOS



mod. 001
Protección
**ABDOMEN TÓRAX
ENTALLADO**




mod. 101
Protección
**ABDOMEN TÓRAX
DE CINTA**

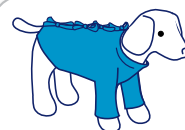


mod. 011
Protección
**ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
ANTERIORES**



mod. 021
Protección
**ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
POSTERIORES**

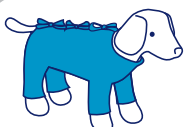

mod. 031
Protección
**ABDOMEN TÓRAX
Y TODOS LOS
MIEMBROS**

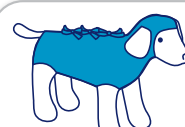

mod. 041
Protección
**CABEZA, CUELLO,
ABDOMEN
ENTALLADO**




mod. 051
Protección
PORTA HOLTER




mod. 052
Protección
**CUBRE
ELECTRODOS**



mod. 061
Protección
**MIEMBROS
ANTERIORES CON
CORDONES**

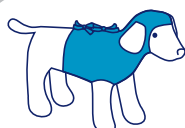

mod. 071
Protección
**CABEZA, CUELLO,
TÓRAX**

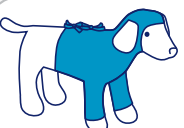

mod. 081
Protección
**CABEZA, CUELLO,
TÓRAX Y MIEMBROS
ANTERIORES**



mod. 091
Protección
TOTAL

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

www.bendana.it