

# cómo se utiliza **BENDANA**



**mod. 011** ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES

PATENTADO



Mientras el animal está todavía sedado, con un metro flexible mide la circunferencia del tórax



A la medida obtenida, restar el 20 % aprox. y en base al valor obtenido elige la talla de BENDANA adecuada



Mide la amplitud de la barriga entre las dos patas



Dobla en dos la protección y toma la 1/2 de la medida obtenida, luego agranda, si es necesario, los cortes ya predispuestos



Siempre, con la protección doblada, si es necesario, crea un orificio para los genitales del macho



Introduce las patas anteriores en los tubulares



Introduce las patas posteriores en los orificios realizados previamente



Pasa BENDANA por debajo del animal y átalos sobre el lomo del mismo



¡Al despertar, el animal estará en perfectas condiciones, a gusto y protegido con BENDANA!

- Extirpación de masas cutáneas y nódulos
- Cirugías abdominales (p. ej. enterotomía, esplenectomía...)
- Cirugías hombros / codos (p. ej. displasia, OCD...)
- Cirugías torácicas (p. ej. lobectomía, pericardiotomía...)
- Ovariohisterectomía - Ovariectomía - esterilización hembra - mastectomía

- Lesiones difusas de diferentes orígenes
- Heridas axilares
- Heridas por lamido
- Heridas por mordida
- Dermatitis (p. ej. hot spots, atopías...)

ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES, disponible en nueve tallas, recomendado para los TIPOS DE INTERVENCIONES indicados anteriormente

...y para estas PATOLOGÍAS COMUNES



**Protección postoperatoria de uso veterinario para mascotas**

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637







# BENDANA

Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ( $\geq 90\%$  algodón y  $5\div 10\%$  elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. PRODUCTO PATENTADO


## CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

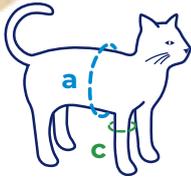

- a** circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**  
**c** circunferencia húmero = **C**

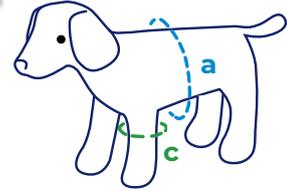

## CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 011)

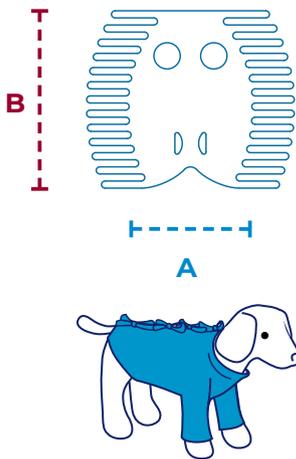

### ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES

artículo	A cm	B cm	talla	peso
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente

## 12 MODELOS DE PRODUCTOS

	<b>mod. 001</b> Protección <b>ABDOMEN TÓRAX ENTALLADO</b>		<b>mod. 101</b> Protección <b>ABDOMEN TÓRAX DE CINTA</b>		<b>mod. 011</b> Protección <b>ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES</b>
	<b>mod. 021</b> Protección <b>ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS POSTERIORES</b>		<b>mod. 031</b> Protección <b>ABDOMEN TÓRAX Y TODOS LOS MIEMBROS</b>		<b>mod. 041</b> Protección <b>CABEZA, CUELLO, ABDOMEN ENTALLADO</b>
	<b>mod. 051</b> Protección <b>PORTA HOLTER</b>		<b>mod. 052</b> Protección <b>CUBRE ELECTRODOS</b>		<b>mod. 061</b> Protección <b>MIEMBROS ANTERIORES CON CORDONES</b>
	<b>mod. 071</b> Protección <b>CABEZA, CUELLO, TÓRAX</b>		<b>mod. 081</b> Protección <b>CABEZA, CUELLO, TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES</b>		<b>mod. 091</b> Protección <b>TOTAL</b>

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)