




comment utiliser **BENDANA**

**mod. 031 ABDOMEN THORAX ET QUATRE MEMBRES**




BREVETÉ

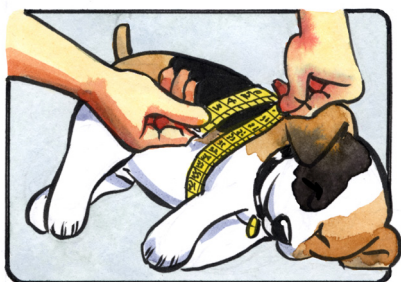


L'animal est encore sous sédatifs, mesurez avec un mètre de couture la circonférence du thorax



Soustrayez de la mesure prise, environ 20% et sur la base de la valeur obtenue choisissez la taille de BENDANA appropriée

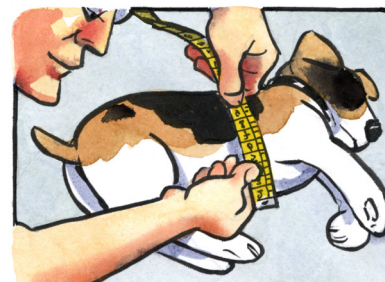


Mesurez l'amplitude de la poitrine (distance entre les deux pattes)

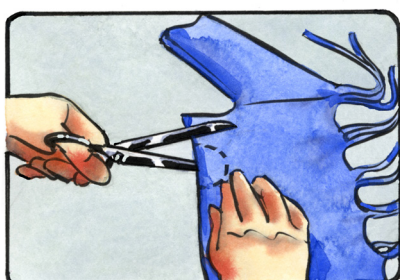


En maintenant la protection pliée, percez, si nécessaire, un trou pour les parties génitales masculines



Enfilez délicatement les pattes arrière

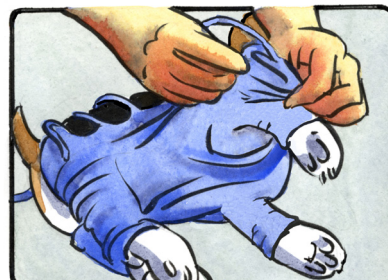

Enfilez les pattes avant dans les parties tubulaires

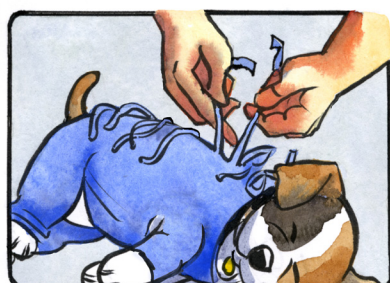

Nouez BENDANA sur le dos



À son réveil, l'animal sera parfaitement confortable et protégé avec BENDANA !

- Ablation masses cutanées et nodules
- Chirurgies abdominales (ex. entérotomie, splénectomie...)
- Chirurgie épaules / coudes (ex. dysplasie, OCD...)
- Chirurgie thoracique (ex. lobectomie, péricardiectomie...)
- Chirurgie anches / genoux / bassin (ex. dysplasies, luxations, traumatismes...)
- Orchiectomie/stérilisation mâle
- Ovario-hystérectomie - Ovariectomie - stérilisation femelle - mastectomie

- Lésions diffuses d'origines différentes
- Blessures axillaires
- Plaies de léchage
- Morsures
- Dermatitis (ex. Hot spot, atopies...)
- Brûlures diffuses

ADDOMEN THORAX ET QUATRE MEMBRES, fournie en neuf tailles, elle est conseillée pour les TYPOLOGIES D'INTERVENTION indiquées ci-dessus

... et pour ces PATHOLOGIES COMMUNES



**Protection post-opératoire usage vétérinaire pour animaux de compagnie**

tél. +39 0444 550361 – fax +39 0444 550268- Arcugnano (VICENZA) Italie

**BENDANA**

P.IVA: IT 03652540240 – n. R.E.A VI 342637- info@bendana.it – ordini@bendana.it- www.bendana.it



MADE IN ITALY




# BENDANA

Il s'agit d'une protection post-opératoire à usage vétérinaire, conçue pour couvrir complètement les pansements de façon sûre et durable, en laissant à l'animal une totale liberté de mouvements et supprimant toute gêne procurée par l'utilisation de pansements, bandes velcro et autres. C'est un bandage élastique très facile d'emploi, pouvant s'adapter en quelques étapes à toutes les races et les tailles, il est facile à retirer même au cours des contrôles de routine pendant la convalescence. Il est fabriqué en tissu naturel de jersey ( $\geq 90\%$  coton et  $5\div 10\%$  élasthane). Il est réalisé en plusieurs modèles, formes et tailles différentes en fonction de la Partie du corps à protéger. Deux solutions sont proposées : des articles ajustés prêts à l'emploi et, pour les plus expérimentés, un Ruban continu, à couper en fonction des besoins.


PRODUIT BREVETÉ

## COMMENT PRENDRE LES MESURES

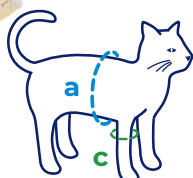


**a** circonférence thoracique -20% environ = **A**

**c** circonférence humérus = **C**

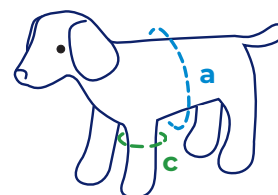

## COMMENT CHOISIR LES TAILLES (MOD. 031)

### ABDOMEN THORAX ET QUATRE MEMBRES

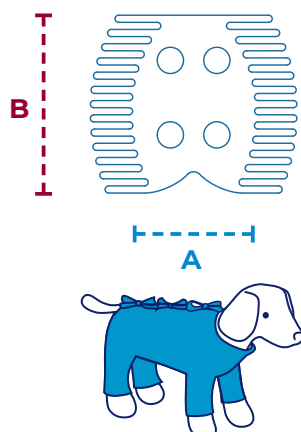

Article	A cm	B cm	taille	poids
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats sans distinction


## 12 MODELES PRODUITS



**mod. 001**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
AJUSTÉE




**mod. 101**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
en RUBAN

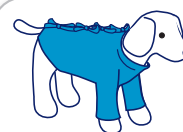


**mod. 011**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
et **MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS**



**mod. 021**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
et **MEMBRES**  
**POSTÉRIEURS**

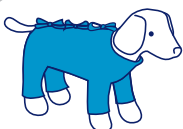

**mod. 031**  
protection  
**ABDOMEN**  
**THORAX** et **QUATRE**  
**MEMBRES**

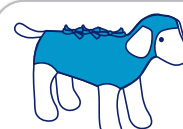

**mod. 041**  
protection  
**TÊTE COU**  
**ABDOMEN AJUSTÉE**



**mod. 051**  
protection  
**PORTE HOLTER**




**mod. 052**  
protection  
**FIXE ÉLECTRODES**



**mod. 061**  
protection  
**MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS AVEC**  
**LACETS**



**mod. 071**  
protection  
**TÊTE COU THORAX**

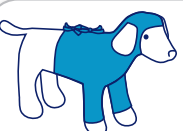

**mod. 081**  
protection  
**TÊTE COU THORAX**  
et **MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS**



**mod. 091**  
protection  
**TOTALE**

Le catalogue complet, le listing des prix et le formulaire de commande sont disponibles sur le site

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)