

cómo se utiliza **BENDANA**



mod. 031 ABDOMEN, TÓRAX Y TODOS LOS MIEMBROS

PATENTADO




Mientras el animal está todavía sedado, con un metro flexible mide la circunferencia del tórax



A la medida obtenida, restar el 20 % aprox. y en base al valor obtenido elige la talla de BENDANA adecuada



Mide la amplitud del pecho (distancia entre las dos patas)

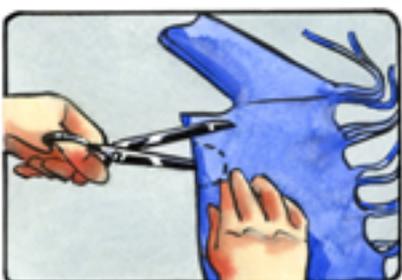

Con la protección doblada, si es necesario, crea un orificio para los genitales del macho



Introduce delicadamente las patas posteriores



Introduce las patas anteriores en los tubulares



Ata BENDANA sobre el lomo



¡Al despertar, el animal estará en perfectas condiciones, a gusto y protegido con BENDANA!

- Extirpación de masas cutáneas y nódulos
- Cirugías abdominales (p. ej. enterotomía, esplenectomía...)
- Cirugías hombros / codos (p. ej. displasia, OCD...)
- Cirugías torácicas (p. ej. lobectomía, pericardiotomía...)
- Cirugías cadera / rodilla / pelvis (p. ej. displasias, luxaciones, traumas...)
- Orquiectomía / esterilización macho
- Ovariectomía - Ovariectomía - esterilización hembra - mastectomía

- Lesiones difusas de diferentes orígenes
- Heridas axilares
- Heridas por lamido
- Heridas por mordida
- Dermatitis (p. ej. hot spots, atopías...)
- Quemaduras difusas

ABDOMEN TORAX Y TODOS LOS MIEMBROS, disponible en nueve tallas, recomendado para los TIPOS DE INTERVENCIONES indicados anteriormente

.... y para estas PATOLOGÍAS COMUNES



Protección postoperatoria de uso veterinario para mascotas

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637




MADE IN ITALY




BENDANA

Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ($\geq 90\%$ algodón y $5\div 10\%$ elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. PRODUCTO PATENTADO


CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

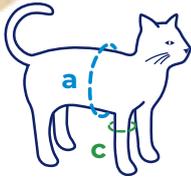

a circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**
c circunferencia húmero = **C**

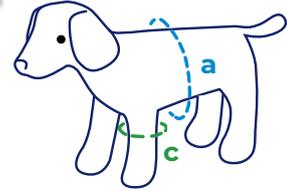

CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 031)

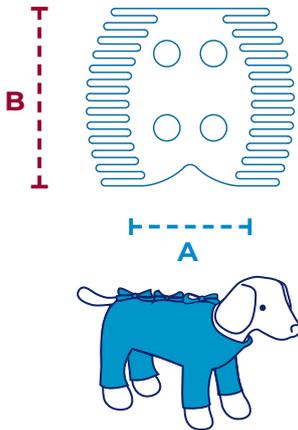

ABDOMEN TÓRAX Y TODOS LOS MIEMBROS


artículo	A cm	B cm	talla	peso
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente

12 MODELOS DE PRODUCTOS



mod. 001
Protección
ABDOMEN TÓRAX
ENTALLADO

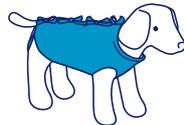

mod. 101
Protección
ABDOMEN TÓRAX
DE CINTA




mod. 011
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
ANTERIORES



mod. 021
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
POSTERIORES



mod. 031
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y TODOS LOS
MIEMBROS

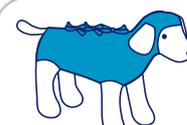

mod. 041
Protección
CABEZA, CUELLO,
ABDOMEN
ENTALLADO




mod. 051
Protección
PORTA HOLTZER




mod. 052
Protección
CUBRE
ELECTRODOS



mod. 061
Protección
MIEMBROS
ANTERIORES CON
CORDONES

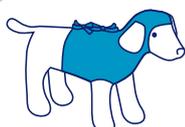

mod. 071
Protección
CABEZA, CUELLO,
TÓRAX

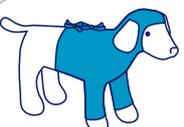

mod. 081
Protección
CABEZA, CUELLO,
TÓRAX Y MIEMBROS
ANTERIORES



mod. 091
Protección
TOTAL

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

www.bendana.it