




mod. 041

comment utiliser **BENDANA**

TÊTE, COU ET ABDOMEN AJUSTÉE



BREVETÉ

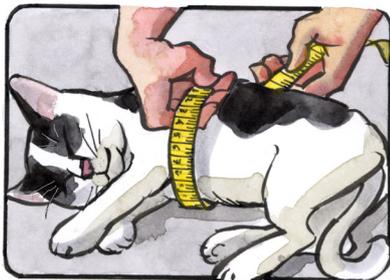

L'animal est encore sous sédatifs, mesurez avec un mètre de couture la circonférence du thorax



Choisissez la taille de BENDANA appropriée sur la base de la mesure prise (-20 % environ)



Mesurez l'amplitude de la poitrine entre les deux pattes



Pliez en deux la protection et reportez la moitié de la mesure de la poitrine, puis, si besoin, élargissez les trous pour les pattes



Contrôlez l'ampleur des oreilles et, si besoin, élargissez les deux trous en demi-lune



Enfilez la protection par la tête en laissant les oreilles libres



Enfilez les pattes dans les trous, en les élargissant si besoin



Nouez Bendana sur le dos



Repliez et coupez la protection en trop, en découvrant le museau et en libérant les yeux



À son réveil, l'animal sera parfaitement confortable et protégé avec BENDANA !

- Chirurgies abdominales (ex. entérotomie, splénectomie...)
- Chirurgie thoracique (ex. lobectomie, péricardiectomie...)
- Chirurgie tête / cou (ex. morsures, thyroïdectomie...)
- Orchiectomie/stérilisation mâle
- Ovario-hystérectomie - Ovariectomie - stérilisation femelle - mastectomie

- Lésions diffuses d'origines différentes
- Plaies de léchage
- Morsures
- Dermatitis (ex. Hot spot, atopies...)

TÊTE COU et ABDOMEN AJUSTÉE, fournie en neuf tailles, elle est conseillée pour les TYPOLOGIES D'INTERVENTION indiquées ci-dessus

... et pour ces PATHOLOGIES COMMUNES



Protection post-opératoire usage vétérinaire pour animaux de compagnie

tél. +39 0444 550361 – fax +39 0444 550268- Arcugnano (VICENZA) Italie

BENDANA

P.IVA: IT 03652540240 – n. R.E.A VI 342637- info@bendana.it – ordni@bendana.it- www.bendana.it



MADE IN ITALY




# BENDANA

Il s'agit d'une protection post-opératoire à usage vétérinaire, conçue pour couvrir complètement les pansements de façon sûre et durable, en laissant à l'animal une totale liberté de mouvements et supprimant toute gêne procurée par l'utilisation de pansements, bandes velcro et autres. C'est un bandage élastique très facile d'emploi, pouvant s'adapter en quelques étapes à toutes les races et les tailles, il est facile à retirer même au cours des contrôles de routine pendant la convalescence. Il est fabriqué en tissu naturel de jersey ( $\geq 90\%$  coton et 5-10% élasthane). Il est réalisé en plusieurs modèles, formes et tailles différentes en fonction de la Partie du corps à protéger. Deux solutions sont proposées : des articles ajustés prêts à l'emploi et, pour les plus expérimentés, un Ruban continu, à couper en fonction des besoins.


PRODUIT BREVETÉ

## COMMENT PRENDRE LES MESURES


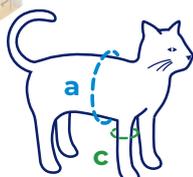


**a** circonférence thoracique -20% environ = **A**

**c** circonférence humérus = **C**

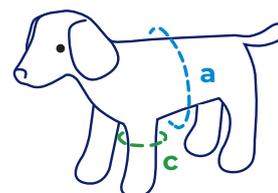

## COMMENT CHOISIR LES TAILLES (MOD. 041)

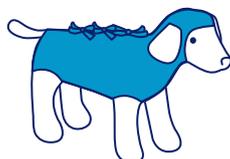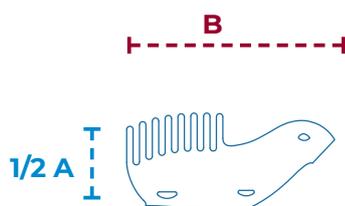


### TETE, COU ET ABDOMEN AJUSTÉE


Article	A cm	B cm	taille	poids
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats sans distinction

## 12 MODELES PRODUITS

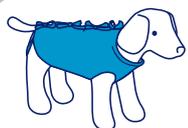

**mod. 001**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
AJUSTÉE

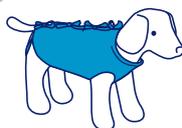

**mod. 101**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
en RUBAN




**mod. 011**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
et **MEMBRES**  
ANTÉRIEURS



**mod. 021**  
protection  
**ABDOMEN THORAX**  
et **MEMBRES**  
POSTÉRIEURS



**mod. 031**  
protection  
**ABDOMEN**  
**THORAX** et **QUATRE**  
**MEMBRES**

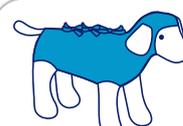


**mod. 041**  
protection  
**TÊTE COU**  
**ABDOMEN AJUSTÉE**




**mod. 051**  
protection  
**PORTE HOLTZER**



**mod. 052**  
protection  
**FIXE ÉLECTRODES**

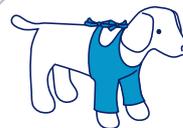

**mod. 061**  
protection  
**MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS AVEC**  
**LACETS**

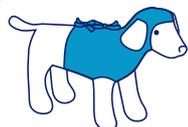

**mod. 071**  
protection  
**TÊTE COU THORAX**



**mod. 081**  
protection  
**TÊTE COU THORAX**  
et **MEMBRES**  
**ANTÉRIEURS**



**mod. 091**  
protection  
**TOTALE**

Le catalogue complet, le listing des prix et le formulaire de commande sont disponibles sur le site

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)