

cómo se utiliza **BENDANA**

mod. 051

PROTECCIÓN PORTA HOLTER



PATENTADO



Material utilizado: 1. aparatos electromédicos, 2. body cubre electrodos, 3. protección porta Holter



Introducir la protección porta holter: primero las patas anteriores y luego la cabeza



Colocar la protección sobre el lomo del animal centrándola lo máximo posible



Pasar el conector a través de una de las dos ranuras presentes en el bolsillo



Introducir los cuatro cordones uno a uno en los agujeros previstos



Conectar el holter e introducirlo en el bolsillo



Cuando el bolsillo esté abierto, atar los cordones hacia la cola



Atar todos los demás cordones hacia la cabeza, excepto el último



Cerrar la solapa del bolsillo, presionando sobre el velcro para que quede bien ajustada



Para mayor seguridad, atar los cordones hacia la cabeza, haciéndolos pasar también por los ojales de la solapa




Aquí está la protección soporte de Holter que lleva el animal



BENDANA


Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ($\geq 90\%$ algodón y $5-10\%$ elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. **PRODUCTO PATENTADO**

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

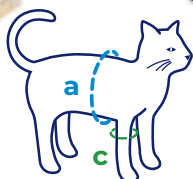


a circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**

c circunferencia húmero = **C**

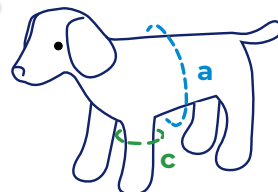

CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 051)

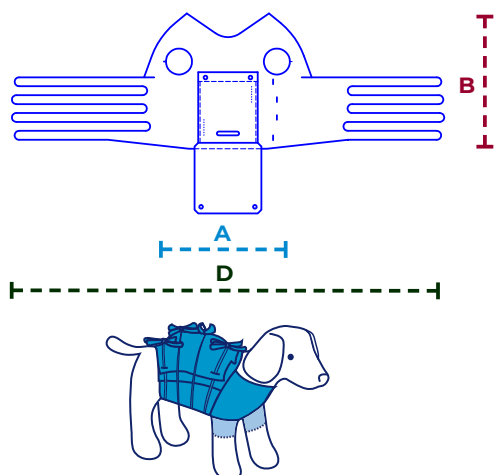

PROTECCIÓN PORTA HOLTER


artículo	A cm	B cm	talla	peso
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente


12 MODELOS DE PRODUCTOS



mod. 001
Protección
ABDOMEN TÓRAX
ENTALLADO

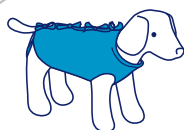


mod. 101
Protección
ABDOMEN TÓRAX
DE CINTA

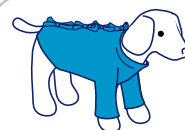


mod. 011
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
ANTERIORES



mod. 021
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
POSTERIORES

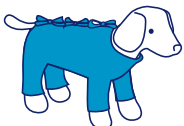

mod. 031
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y TODOS LOS
MIEMBROS

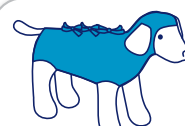

mod. 041
Protección
CABEZA, CUELLO,
ABDOMEN
ENTALLADO




mod. 051
Protección
PORTA HOLTER




mod. 052
Protección
CUBRE
ELECTRODOS



mod. 061
Protección
MIEMBROS
ANTERIORES CON
CORDONES

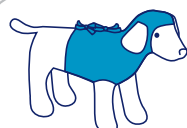

mod. 071
Protección
CABEZA, CUELLO,
TÓRAX

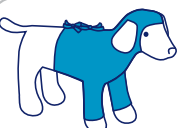

mod. 081
Protección
CABEZA, CUELLO,
TÓRAX Y MIEMBROS
ANTERIORES



mod. 091
Protección
TOTAL

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

www.bendana.it