

comment utiliser **BENDANA**

PROTECTION FIXE ÉLÉCTRODES



BREVETÉ



modb 052

Matériel étalé: 1. appareils électromédicaux, 2. body couvre électrodes, 3. protection porte



Enfilez le body : d'abord les jambes et puis la tête



Phase de fixation des électrodes



Couvrir les électrodes avec le body



Passer le connecteur dans le trou du body et superposer les deux rabats



Après avoir bien superposé les deux rabats, les fixer avec au moins de bandes de pansement



Enfiler la protection porte Holter: d'abord les jambes avant et puis la tête



Placer la protection sur le dos de l'animal en la centrant le plus possible









Il s'agit d'une protection post-opératoire à usage vétérinaire, conçue pour couvrir complètement les pansements de façon sûre et durable, en laissant à l'animal une totale liberté de mouvements et supprimant toute gêne procurée par l'utilisation de pansements, bandes velcro et autres. C'est un bandage élastique très facile d'emploi, pouvant s'adapter en quelques étapes à toutes les races et les tailles, il est facile à retirer même au cours des contrôles de routine pendant la convalescence. Il est fabriqué en tissu naturel de jersey (≥ 90% coton et 5÷10% élasthane). Il est réalisé en plusieurs modèles, formes et tailles différentes en fonction de la Partie du corps à protéger. Deux solutions sont proposées : des articles ajustés prêts à l'emploi et, pour les plus expérimentés, un Ruban continu, à couper en fonction des besoins.


COMMENT PRENDRE LES MESURES

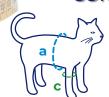

- a circonférence thoracique -20% environ = **A**
- c circonférence humérus = C

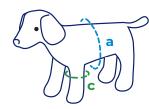

COMMENT CHOISIR LES TAILLES (MOD. 052)

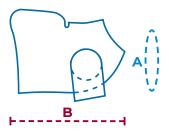



PROTECTION FIXE ÉLÉCTRODES

article	A cm	B cm	taille	poids
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001. 35	35	50	XS	7 - 10
001. 40	40	58	S	10 - 15
001. 45	45	65	М	15 - 20
001. 55	55	80	L	20 - 30
001. 65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats sans distinction

12 MODELES PRODUITS



mod. 001 protection ABDOMEN THORAX AJUSTÉE



mod. 101 protection ABDOMEN THORAX en RUBAN




mod. 011 protection ABDOMEN THORAX et MEMBRES ANTÉRIEURS



mod. 021
protection
ABDOMEN THORAX
et MEMBRES
POSTÉRIEURS



mod. 031
protection
ABDOMEN
THORAX et QUATRE
MEMBRES

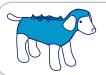

mod. 041 protection TÊTE COU ABDOMEN AJUSTÉE



mod. 051
protection
PORTE HOLTER



mod. 052 protection FIXE ÉLÉCTRODES



mod. 061 protection MEMBRES ANTÉRIEURS AVEC LACETS



mod. 071 protection TÊTE COU THORAX



mod. 081
protection
TÊTE COU THORAX
et MEMBRES
ANTÉRIEURS



mod. 091 protection TOTALE