



cómo se utiliza **BENDANA**

**mod. 052 PROTECCIÓN CUBRE ELECTRODOS**



PATENTADO



Material utilizado: 1. aparatos electromédicos, 2. body cubre electrodos, 3. protección porta Holter



Introducir el body: primero las patas y luego la cabeza



Fases de sujeción de los electrodos



Cubrir los electrodos con el body



Pasar el conector dentro del orificio del body y superponer las dos solapas



Después de haber superpuesto bien las dos solapas, fijar con al menos dos tiras de cinta adhesiva



Introducir la protección porta holter: primero las patas anteriores y luego la cabeza



Colocar la protección sobre el lomo del animal centrándola lo máximo posible



**Protección postoperatoria de uso veterinario para mascotas**

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






# BENDANA


Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ( $\geq 90\%$  algodón y  $5\div 10\%$  elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. PRODUCTO PATENTADO

## CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

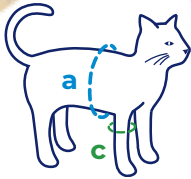


**a** circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**

**c** circunferencia húmero = **C**

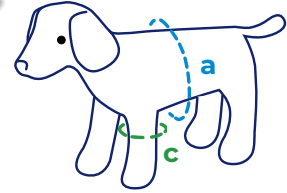

## CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 052)

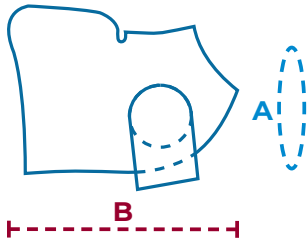

### PROTECCIÓN CUBRE ELECTRODOS


artículo	A cm	B cm	talla	peso
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente


## 12 MODELOS DE PRODUCTOS



**mod. 001**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX ENTALLADO**

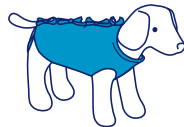

**mod. 101**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX DE CINTA**

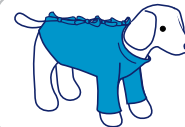

**mod. 011**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES**



**mod. 021**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX Y MIEMBROS POSTERIORES**



**mod. 031**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX Y TODOS LOS MIEMBROS**



**mod. 041**  
Protección  
**CABEZA, CUELLO, ABDOMEN ENTALLADO**




**mod. 051**  
Protección  
**PORTA HOLTER**




**mod. 052**  
Protección  
**CUBRE ELECTRODOS**



**mod. 061**  
Protección  
**MIEMBROS ANTERIORES CON CORDONES**

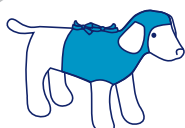

**mod. 071**  
Protección  
**CABEZA, CUELLO, TÓRAX**

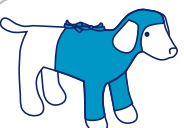

**mod. 081**  
Protección  
**CABEZA, CUELLO, TÓRAX Y MIEMBROS ANTERIORES**



**mod. 091**  
Protección  
**TOTAL**

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)