

cómo se utiliza **BENDANA**



mod. 061 MIEMBROS ANTERIORES CON CORDONES

PATENTADO



Mientras el animal está todavía sedado, con un metro flexible mide la circunferencia del húmero



En base a la medición elige la talla de BENDANA adecuada



Mide el largo de las patas sumado a la amplitud del pecho del animal (pasando debajo del pecho)



Dobla BENDANA por la mitad, toma la 1/2 de la medida relevada y acorta la protección si esta resulta demasiado larga



Introduce las patas



Pasa BENDANA por debajo del animal y átalos sobre el lomo del mismo



¡Al despertar, el animal estará en perfectas condiciones, a gusto y protegido con BENDANA!

- Extirpación de masas cutáneas y nódulos
- Cirugías hombros / codos (p. ej. displasia, OCD...)
- Cirugías torácicas (p. ej. lobectomía, pericardiotomía...)

MIEMBROS ANTERIORES CON CORDONES, disponible en nueve tallas, recomendado para los TIPOS DE INTERVENCIÓNES indicados anteriormente

- Lesiones difusas de diferentes orígenes
- Heridas axilares
- Heridas por lamido
- Heridas por mordida
- Dermatitis (p. ej. hot spots, atopías...)

.... y para estas PATOLOGÍAS COMUNES



Protección postoperatoria de uso veterinario para mascotas

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637




MADE IN ITALY




BENDANA

Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ($\geq 90\%$ algodón y $5\div 10\%$ elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. PRODUCTO PATENTADO

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS


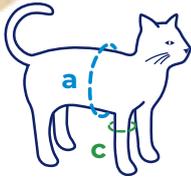


- a** circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**
- c** circunferencia húmero = **C**

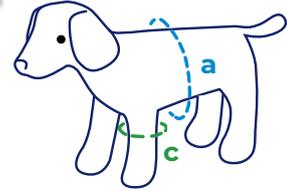

CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 061)

MIEMBROS ANTERIORES CON CORDONES

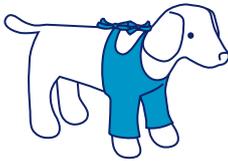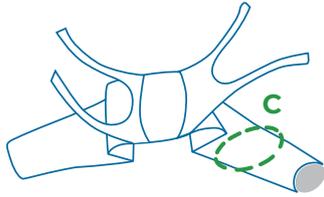


artículo	A cm	B cm	C	talla	peso
001.20	20	32	10	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	12	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	15	XXS	5 - 7
001.35	35	50	17	XS	7 - 10
001.40	40	58	20	S	10 - 15
001.45	45	65	22	M	15 - 20
001.55	55	80	27	L	20 - 30
001.65	65	95	32	XL	30 - 40
001.75	75	110	37	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente

12 MODELOS DE PRODUCTOS



mod. 001
Protección
ABDOMEN TÓRAX
ENTALLADO

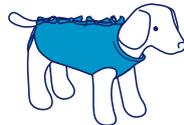

mod. 101
Protección
ABDOMEN TÓRAX
DE CINTA




mod. 011
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
ANTERIORES



mod. 021
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y MIEMBROS
POSTERIORES



mod. 031
Protección
ABDOMEN TÓRAX
Y TODOS LOS
MIEMBROS

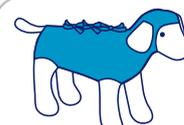

mod. 041
Protección
CABEZA, CUELLO,
ABDOMEN
ENTALLADO




mod. 051
Protección
PORTA HOLTER



mod. 052
Protección
CUBRE
ELECTRODOS



mod. 061
Protección
MIEMBROS
ANTERIORES CON
CORDONES

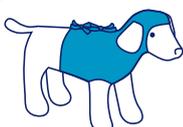

mod. 071
Protección
CABEZA, CUELLO,
TÓRAX



mod. 081
Protección
CABEZA, CUELLO,
TÓRAX Y MIEMBROS
ANTERIORES



mod. 091
Protección
TOTAL

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

www.bendana.it