


comment utiliser **BENDANA**



mod. 081 TÊTE, COU, THORAX ET MEMBRES ANTÉRIEURS


BREVETÉ

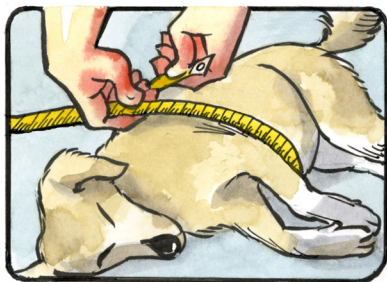


L'animal est encore sous sédatifs, mesurez avec un mètre de couture la circonférence du thorax



Choisissez la taille de BENDANA appropriée sur la base de la mesure prise (-20 % environ)

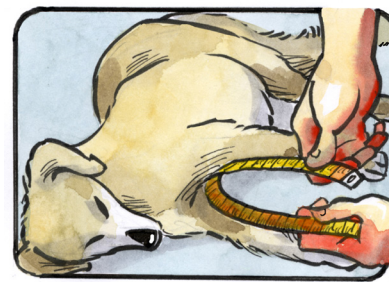


Mesurez la longueur des pattes additionnée à l'ampleur de la poitrine de l'animal (en passant sous la poitrine)

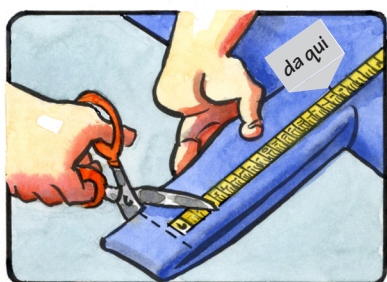


Reportez la moitié de la longueur que vous venez de prendre et raccourcissez les parties tubulaires en conséquence




Contrôlez la largeur des oreilles et, si besoin, élargissez les deux trous en demi-lune

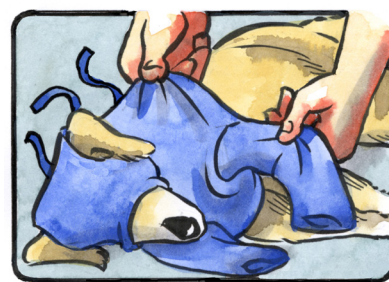


Enfilez la protection par la tête en laissant les oreilles libres

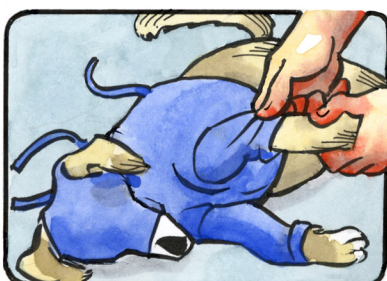

Enfilez les pattes avant dans les parties tubulaires

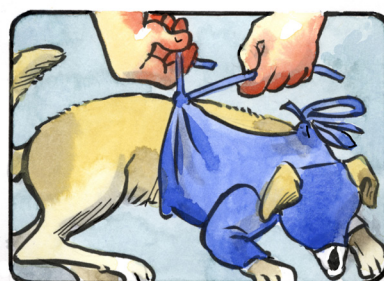

Nouez Bendana sur le dos

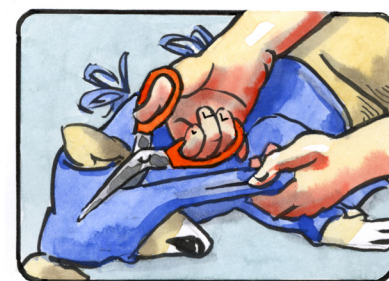

Coupez la protection en trop et découvrez tout le museau, ou bien créez deux trous en correspondance des yeux



À son réveil, l'animal sera parfaitement confortable et protégé avec BENDANA !

- Ablation masses cutanées et nodules
- Chirurgie épaules / coudes (ex. dysplasie, OCD...)
- Chirurgie thoracique (ex. lobectomie, péricardiotomie...)
- Chirurgie tête / cou (ex. morsures, thyroïdectomie...)

TÊTE, COU, THORAX et MEMBRES ANTÉRIEURS, fournie en neuf tailles, elle est conseillée pour les TYPOLOGIES D'INTERVENTION indiquées ci-dessus

- Lésions diffuses d'origines différentes
- Blessures axillaires
- Plaies de léchage
- Morsures
- Dermatitis (ex. Hot spot, atopies...)
- Brûlures diffuses

... et pour ces PATHOLOGIES COMMUNES :



Protection post-opératoire usage vétérinaire pour animaux de compagnie

tél. +39 0444 550361 – fax +39 0444 550268- Arcugnano (VICENZA) Italie

BENDANA

P.IVA: IT 03652540240 – n. R.E.A VI 342637- info@bendana.it – ordini@bendana.it- www.bendana.it



MADE IN ITALY




BENDANA

Il s'agit d'une protection post-opératoire à usage vétérinaire, conçue pour couvrir complètement les pansements de façon sûre et durable, en laissant à l'animal une totale liberté de mouvements et supprimant toute gêne procurée par l'utilisation de pansements, bandes velcro et autres. C'est un bandage élastique très facile d'emploi, pouvant s'adapter en quelques étapes à toutes les races et les tailles, il est facile à retirer même au cours des contrôles de routine pendant la convalescence. Il est fabriqué en tissu naturel de jersey ($\geq 90\%$ coton et $5\div 10\%$ élasthane). Il est réalisé en plusieurs modèles, formes et tailles différentes en fonction de la Partie du corps à protéger. Deux solutions sont proposées : des articles ajustés prêts à l'emploi et, pour les plus expérimentés, un Ruban continu, à couper en fonction des besoins.


PRODUIT BREVETÉ

COMMENT PRENDRE LES MESURES

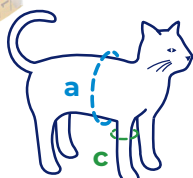



a circonférence thoracique -20% environ = **A**

c circonférence humérus = **C**

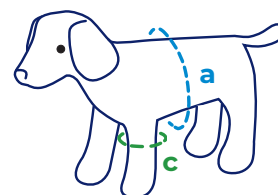

COMMENT CHOISIR LES TAILLES (MOD. 081)

PROTECTION TÊTE COU THORAX et MEMBRES ANTÉRIEURS

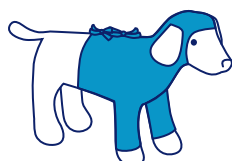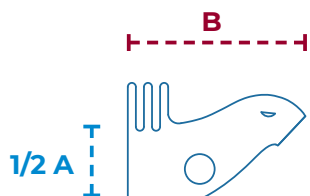

Article	A cm	B cm	taille	poids
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats sans distinction


12 MODELES PRODUITS



mod. 001
protection
ABDOMEN THORAX
AJUSTÉE




mod. 101
protection
ABDOMEN THORAX
en RUBAN

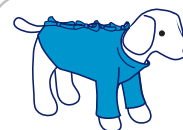


mod. 011
protection
ABDOMEN THORAX
et MEMBRES
ANTÉRIEURS



mod. 021
protection
ABDOMEN THORAX
et MEMBRES
POSTÉRIEURS

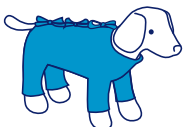


mod. 031
protection
ABDOMEN
THORAX et QUATRE
MEMBRES

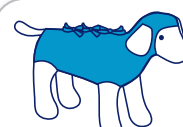

mod. 041
protection
TÊTE COU
ABDOMEN AJUSTÉE




mod. 051
protection
PORTE HOLTER

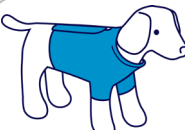

mod. 052
protection
FIXE ÉLECTRODES



mod. 061
protection
MEMBRES
ANTÉRIEURS AVEC
LACETS

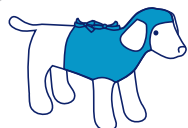

mod. 071
protection
TÊTE COU THORAX



mod. 081
protection
TÊTE COU THORAX
et MEMBRES
ANTÉRIEURS



mod. 091
protection
TOTALE

Le catalogue complet, le listing des prix et le formulaire de commande sont disponibles sur le site

www.bendana.it