# comment utiliser **BENDANA**

### **PROTECTION TOTALE**



BREVETÉ



L'animal est encore sous sédatifs, mesurez avec un mètre de couture la circonférence du thorax



Choisissez la taille de BENDANA appropriée sur la base de la mesure prise (-20 % environ)



Mesurez la longueur des pattes additionnée à l'ampleur de la poitrine de l'animal (en passant sous la poitrine)



Reportez la moitié de la longueur que vous venez de prendre et raccourcissez les parties tubulaires en conséquence



Contrôlez la largeur des oreilles et, si besoin, élargissez les deux trous en demi-lune



Enfilez la protection par la tête en laissant les oreilles libres



Enfilez les pattes antérieures et postérieures dans les parties tubulaires



Nouez Bendana sur le dos



Coupez la protection en trop et découvrez tout le museau, ou bien créez deux trous en correspondance des yeux



À son réveil, l'animal sera parfaitement confortable et protégé avec BENDANA!

- Ablation masses cutanées et nodules
  Chirurgies abdominales (ex. entéroto-
- mie, splénectomie...)
   Chirurgie épaules / coudes (ex. dysplasie, OCD...)
- Chirurgie thoracique (ex. lobectomie, péricardiotomie...)
- Chirurgie anches / genoux / bassin (ex. dysplasies, luxations, traumatismes...)
- Chirurgie tête / cou (ex. morsures, thyroïdectomie...)
- Orchiectomie/stérilisation mâle
- Ovario-hystérectomie Ovariectomie stérilisation femelle - mastectomie

- Lésions diffuses d'origines différentes
- Blessures axillaires
- Plaies de léchage
- Morsures
- Dermatites (ex. Hot spot, atopies...)
- Brûlures diffuses

... et pour ces PATHOLOGIES COMMUNES

PROTECTION TOTALE, fournie en neuf tailles, elle est conseillée pour les TYPOLOGIES D'INTERVENTION indiquées ci-dessus








Il s'agit d'une protection post-opératoire à usage vétérinaire, conçue pour couvrir complètement les pansements de façon sûre et durable, en laissant à l'animal une totale liberté de mouvements et supprimant toute gêne procurée par l'utilisation de pansements, bandes velcro et autres. C'est un bandage élastique très facile d'emploi, pouvant s'adapter en quelques étapes à toutes les races et les tailles, il est facile à retirer même au cours des contrôles de routine pendant la convalescence. Il est fabriqué en tissu naturel de jersey (≥ 90% coton et 5÷10% élasthane). Il est réalisé en plusieurs modèles, formes et tailles différentes en fonction de la Partie du corps à protéger. Deux solutions sont proposées : des articles ajustés prêts à l'emploi et, pour les plus expérimentés, un Ruban continu, à couper en fonction des besoins.

### **COMMENT PRENDRE LES MESURES**



- a circonférence thoracique -20% environ = A
- c circonférence humérus = C

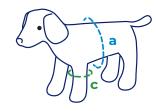

## COMMENT CHOISIR LES TAILLES (MOD. 091)

# F----





# PROTECTION TOTALE

Article	<b>A</b> cm	<b>B</b> cm	taille	poids
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001. 35	35	50	XS	7 - 10
001. 40	40	58	S	10 - 15
001. 45	45	65	М	15 - 20
001. 55	55	80	L	20 - 30
001. 65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats sans distinction

#### 12 MODELES PRODUITS



mod. 001 protection ABDOMEN THORAX AJUSTÉE



mod. 101 protection ABDOMEN THORAX en RUBAN




mod. 011 protection ABDOMEN THORAX et MEMBRES ANTÉRIEURS



mod. 021
protection
ABDOMEN THORAX
et MEMBRES
POSTÉRIEURS



mod. 031
protection
ABDOMEN
THORAX et QUATRE
MEMBRES

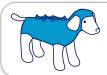

mod. 041 protection TÊTE COU ABDOMEN AJUSTÉE



mod. 051 protection PORTE HOLTER



mod. 052 protection FIXE ÉLÉCTRODES



mod. 061 protection MEMBRES ANTÉRIEURS AVEC LACETS



mod. 071
protection
TÊTE COU THORAX



mod. 081
protection
TÊTE COU THORAX
et MEMBRES
ANTÉRIEURS



mod. 091
protection