


mod. 101

# cómo se utiliza **BENDANA** ABDOMEN TÓRAX DE CINTA



PATENTADO

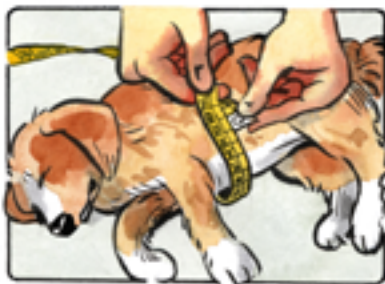


Mientras el animal está todavía sedado, con un metro flexible mide la circunferencia del tórax



A la medida obtenida, restar el 20 % aprox. y en base al valor obtenido elige la talla de BENDANA adecuada



Decide si introducir dos o cuatro patas, luego mide el largo del animal hasta donde sea necesario (bajo vientre o miembros posteriores)

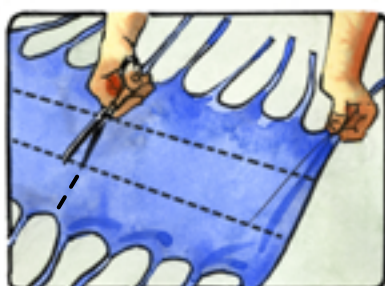

Agrega un 20 % aprox. a la medida obtenida, luego corta BENDANA al largo establecido para 2 o 4 patas



Mide la amplitud del pecho entre las dos patas



Dobra en dos la protección y toma la 1/2 de la medida del pecho, luego realiza dos orificios en medialuna para las patas



Para un mejor calce, profundiza simétricamente la curva de las tiras del lado del cuello y de la cola



Siempre, con la protección doblada, si es necesario, crea un orificio para los genitales del macho



Introduce las patas en las aberturas realizadas anteriormente



Pasa BENDANA por debajo del animal y átalalo sobre el lomo del mismo



¡Al despertar, el animal estará en perfectas condiciones, a gusto y protegido con BENDANA!

- Extirpación de masas cutáneas y nódulos
- Cirugías abdominales
- Cirugías torácicas
- Ovariectomía-Ovariohisterectomía / esterilización hembra
- Orquiectomía / esterilización macho

ABDOMEN TÓRAX ENTALLADO, disponible en nueve tallas, recomendado para los TIPOS DE INTERVENCIONES indicados anteriormente



**Protección postoperatoria de uso veterinario para mascotas**

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637




MADE IN ITALY




# BENDANA

Es una protección postoperatoria de uso veterinario, pensada para cubrir completamente las curaciones, de manera segura y duradera, permitiendo al animal absoluta libertad de movimiento y eliminando cualquier molestia producida por el uso de cinta adhesiva, velcro y productos similares. Es un vendaje elástico muy simple de usar, adaptable en pocos pasos a cualquier raza y talla, fácil de quitar también durante los controles de rutina durante la convalecencia. Está realizado en tejido natural de jersey ( $\geq 90\%$  algodón y  $5\div 10\%$  elastano). Se fabrica en varios modelos, en formas y medidas diferentes según la parte del cuerpo que se debe proteger, disponible en dos modelos: en artículos entallados listos para usar, para los más expertos, de cinta continua, para cortar según la necesidad. PRODUCTO PATENTADO

## CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

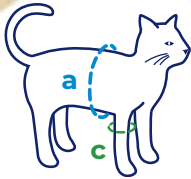


- a** circunferencia torácica -20 % aprox. = **A**
- c** circunferencia húmero = **C**

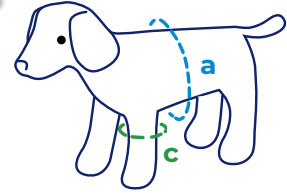

## CÓMO ELEGIR LAS TALLAS (MOD 101)

### ABDOMEN TÓRAX DE CINTA

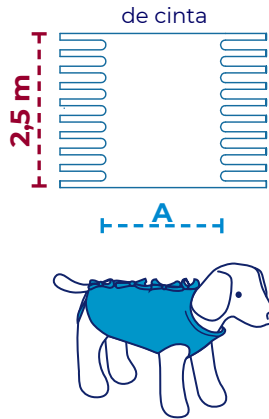

artículo	A cm	B cm	talla	peso
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Todos los modelos se pueden utilizar en perros y gatos indistintamente


## 12 MODELOS DE PRODUCTOS




**mod. 001**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX  
ENTALLADO**



**mod. 101**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX  
DE CINTA**

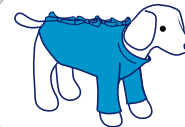


**mod. 011**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX  
Y MIEMBROS  
ANTERIORES**

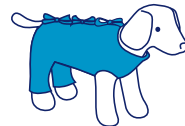

**mod. 021**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX  
Y MIEMBROS  
POSTERIORES**



**mod. 031**  
Protección  
**ABDOMEN TÓRAX  
Y TODOS LOS  
MIEMBROS**

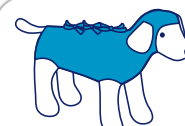

**mod. 041**  
Protección  
**CABEZA, CUELLO,  
ABDOMEN  
ENTALLADO**




**mod. 051**  
Protección  
**PORTA HOLTER**




**mod. 052**  
Protección  
**CUBRE  
ELECTRODOS**



**mod. 061**  
Protección  
**MIEMBROS  
ANTERIORES CON  
CORDONES**

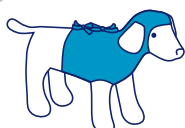

**mod. 071**  
Protección  
**CABEZA, CUELLO,  
TÓRAX**

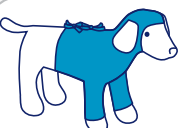

**mod. 081**  
Protección  
**CABEZA, CUELLO,  
TÓRAX Y MIEMBROS  
ANTERIORES**



**mod. 091**  
Protección  
**TOTAL**

El catálogo completo, la lista y el formulario de pedido están disponibles en el sitio web

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)